

## Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: [wyniki.diag.pl](https://wyniki.diag.pl)
- + wybierz /pojedyncze zlecenie/
- + wpisz numer zlecenia
- + podaj datę urodzenia

Kod kreskowy/numer Twojego zlecenia:

### Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium.

### Zachowaj go!

Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:

 | **695 235 299**

 | [kontakt@nowagenetyka.pl](mailto:kontakt@nowagenetyka.pl)

# Diagpack



## Badanie laboratoryjne do samodzielnego pobrania

### Instrukcja pobrania

Pakiet przeznaczony dla kobiet  
Diagnostyka zakażeń urogenitalnych

Przekazujemy Paniom zestaw umożliwiający samodzielne pobranie w zaciszu domowym materiału komórkowego do badania molekularnego.

Test pozwala na szybką i czułą diagnostykę infekcji urogenitalnych.

### Skład zestawu:

- szczoteczka Evalyn®Brush,
- foliowa torebka,
- kod kreskowy do naklejenia na szczoteczkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.



# Diagnostyka+

[diagnostyka.pl](https://diagnostyka.pl)

## Przed pobraniem:

1. Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
2. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu skontaktuj się pisząc na adres mailowy: [diagpack@diag.pl](mailto:diagpack@diag.pl)
3. Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE. W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

**UWAGA!** Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku i koniecznością zakupu nowego zestawu na koszt pacjenta.



## Odeślanie zestawu

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 80 dni od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną;

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

+ Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>

+ Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”

+ Przesyłka jest opłacona.

**UWAGA:** Nie rekomendujemy odosłania przesyłki do Punktów Obsługi Paczek.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek - piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.


## Instrukcja pobrania wymazu:

### UWAGA!

- Nie używaj podczas menstruacji.
- Nie używaj w ciąży ani przez trzy miesiące po zakończeniu ciąży.
- Nie używaj żadnych produktów dopochwowych przez co najmniej dwa dni przed użyciem szczoteczki Evalyn®Brush.
- Można normalnie używać dopochwowych środków antykoncepcyjnych, prezerwatyw oraz środków nawilżających na bazie wody.




Przed użyciem umyj ręce.

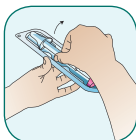


Wymij szczoteczkę Evalyn®Brush z opakowania. Nie wyrzucaj opakowania, gdyż będzie ono potrzebne do wysłania szczoteczki Evalyn®Brush do laboratorium po użyciu.




Ściśnij boki różowej nasadki za pomocą kciuka i palca wskazującego w celu jej zdjęcia ze szczoteczki Evalyn®Brush. Pamiętaj, aby nie dotykać rękami białych włosków szczoteczki Evalyn®Brush!

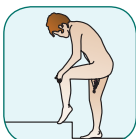


Pobieraj próbkę w pozycji stojącej. Zapewnij sobie wygodne podparcie (takie jak np. do wkładania tamponu).

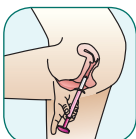

Rozchyl jedną ręką wargi sromowe, a drugą wprowadź szczoteczkę Evalyn®Brush do pochwy, aż skrzydełka zetkną się z wargami sromowymi.

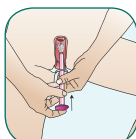


Przytrzymaj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą dociśnij różowy uchwyt w kierunku przezroczystej obudowy. Gdy szczoteczka znajdzie się we właściwym położeniu z różowym uchwytem przy obudowie, usłyszysz i poczujesz kliknięcie.

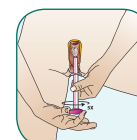

Obróć różowy uchwyt o pięć obrotów w tym samym kierunku. Po każdym obrocie usłyszysz kliknięcie. Kliknięcia będą pomocne w liczeniu obrotów. Po pięciokrotnym obrocie uchwytu ostrożnie wyjmij szczoteczkę Evalyn®Brush.




Przytrzymaj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą pociągnij różowy uchwyt, aż biała szczoteczka schowa się w obudowie. Podczas wykonywania tej czynności nie dotykaj szczoteczki Evalyn®Brush powyżej skrzydełek.

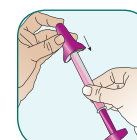

Przytrzymaj przezroczysty koniec tak, aby biała szczoteczka nie wysunęła się ponownie. Umieść różową nasadkę z powrotem na szczoteczce Evalyn®Brush za pomocą kciuka i palca wskazującego. Po prawidłowym założeniu usłyszysz kliknięcie.



Naklej na przezroczystą obudowę szczoteczki - wzdłuż obudowy - naklejkę z indywidualnym kodem kreskowym. Umieść szczoteczkę Evalyn®Brush z powrotem w plastikowym opakowaniu.

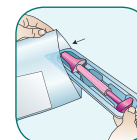

Umieść opakowanie zawierające szczoteczkę Evalyn®Brush w dostarczonej plastikowej torebce i zamknij torebkę.



Zapakuj opakowanie ze szczoteczką Evalyn®Brush do pudełka.

Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą pobrania oraz e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału. Nie odsyłaj Instrukcji pobrania, znajduje się na niej Twój unikalny kod do odbioru wyniku.



Wyślij materiał do laboratorium niezwłocznie. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją