

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

NUMER ZLECENIA

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!



1. wejdź na stronę <https://wyniki.diag.pl>,
2. wybierz „POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz NUMER ZLECENIA oraz DATĘ URODZENIA

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:

 **695 235 299**

 e-mail: kontakt@polskagenetyka.pl



www.diagnostryka.pl



 **DIAGpack**

BADANIE LABORATORYJNE DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

INSTRUKCJA POBRANIA

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ UROGENITALNYCH

Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający samodzielne pozyskanie materiału do badania laboratoryjnego. Test pozwala na szeroką diagnostykę chorób przenoszonych drogą płciową, tzw. STD (ang. sexually transmitted diseases) lub STI (ang. sexually transmitted infections).

SKŁAD ZESTAWU:

- probówka wypełniona buforem wraz z jednomiarową pipetą,
- pojemnik do pobrania moczu,
- rękawiczki,
- kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.

 **DIAGNOSTYKA**
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

PRZED ROZPOCZĘCIEM POBRANIA:

- Przed pobraniem próbki moczu należy ograniczyć zabiegi higieniczne - pielęgnacyjne okolice narządów płciowych.
- Pacjent nie powinien oddawać moczu co najmniej godzinę przed pobraniem próbki.

INSTRUKCJA POBRANIA:



1. Dokładnie umyj ręce i załóż rękawiczki.



2. Pobierz pierwszych 20 do 30 ml świeżo oddanego moczu (pierwsza część strumienia) do pojemnika na mocz.



3. Odkręć zakrętkę probówki transportowej z zestawu pobraniowego uważając, by nie rozlać znajdującego się w środku buforu, ostrożnie obchodź się z zakrętką i probówką, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia w tym również zewnętrznej powierzchni probówki transportowej oraz zakrętki.



4. Przy użyciu plastikowej pipety jednomiarowej przelej mocz z pojemnika do probówki transportowej tak, aby poziom moczu w probówce był widoczny w okienku z podziałką na etykiecie probówki. Do przeniesienia odpowiedniej objętości moczu wystarczy niewiele ponad jedno pełne ściśnięcie pipety jednomiarowej.



5. Probówka nie może zostać przepelniona.



6. Ostrożnie zamknij probówkę przy pomocy zakrętki, upewnij się, czy zakrętka jest mocno zakręcona.



7. Probówkę czytelnie opisz imieniem i nazwiskiem pacjenta, rodzajem materiału „Mocz” oraz datą pobrania.



8. Naklej kod kreskowy **wzdłuż probówki** (uważaj, aby nie zasłonić okienka wskazującego prawidłowy poziom płynu w probówce).



9. Umieść probówkę w pudełku. **Pamiętaj**, że do pudełka musi zostać **dołączone dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą pobrania oraz e-voucher** otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.

Pudełko wyślij najpóźniej w następnym dniu roboczym po pobraniu. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj je w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.

ODEŚLANIE ZESTAWU:

80
dni

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest **ważny 80 dni roboczych od daty wystawienia**.



Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>

Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”. **Przesyłka jest opłacona.**



Wysyłka powinna nastąpić **w dniach poniedziałek - piątek**. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.