

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

NUMER ZLECENIA

Uwaga!
Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!



1. wejdź na stronę <https://wyniki.diag.pl>,
2. wybierz POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz NUMER ZLECENIA
oraz DATĘ URODZENIA

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:

 **695 235 299**

 e-mail: kontakt@polskagenetyka.pl



BADANIE LABORATORYJNE DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA kleszcza do wysyłki

NAZWA
BADANIA:

BADANIE KLESZCZA
Borrelia burgdorferi DNA
met. real time PCR

Przekazujemy Państwu zestaw transportowy umożliwiający przesłanie kleszcza do laboratorium.

W kleszczu usuniętym z miejsca wkłucia, oceniana jest obecność DNA bakterii wywołujących boreliozę: *B. burgdorferi sensu stricto*, *B. andersoni*, *B. bissetti*, *B. garini*, *B. afzeli*, *B. valaisiana*, *B. lusitaniae*, *B. japonica*, *B. tanukii*, *B. turdi*, *B. sinica*.

SKŁAD ZESTAWU:

- jałowy pojemnik na kleszcza,
- pęseta jednorazowa,
- woreczek strunowy,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych osoby zlecającej badanie,
- e-voucher,
- instrukcja przygotowania kleszcza do wysyłki,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.



PRZED WYSYŁKĄ:

1. Sprawdź kompletność zestawu. Jeśli brakuje w nim któregoś z elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu. Skontaktuj się pisząc na adres e-mail: diagpack@diag.pl
2. Wypełnij OŚWIADCZENIE i podpisz je w prawym dolnym rogu.
3. W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

PRZYGOTOWANIE KLESZCZA DO WYSYŁKI



1. Umyj ręce.



2. Umieść kleszcza w jałowym, zakręcanym pojemniku, za pomocą dołączonej do zestawu pęsety.



3. Pojemnik z kleszczem umieść w woreczku strunowym.



4. Wypełnij i podpisz OŚWIADCZENIE.



5. Umieść wszystko w pudełku. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione OŚWIADCZENIE.



6. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temp. 2-8°C.

ODEŚLANIE ZESTAWU:



Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę” **Przesyłka jest opłacona.**



Wysyłka powinna nastąpić w dniach **poniedziałek - piątek**. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.