

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

NUMER ZLECENIA

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

1. wejdź na stronę **<https://wyniki.diag.pl>**,
2. wybierz „POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz NUMER ZLECENIA
oraz DATĘ URODZENIA

 **DIAGNOSTYKA**
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

 **DIAGpack**

BADANIE LABORATORYJNE DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

INSTRUKCJA POBRANIA

NANODIAGBIOME

- badanie mikrobioty jelitowej

Przekazujemy Państwu zestaw umożliwiający samodzielne pobranie w zaciszu domowym materiału do badania molekularnego. Test pozwala na szybką i czułą ocenę składu mikrobiomu jelit.

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



695 235 299



e-mail: kontakt@nowagenetyka.pl

SKŁAD ZESTAWU:

- probówka wraz ze szpatułką,
- rękawiczki,
- biodegradowalna podkładka toaletowa,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.



www.diagnostyka.pl



 **DIAGNOSTYKA**
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

PRZED ROZPOCZĘCIEM POBRANIA:

Przed pobraniem próbki kału

- W razie potrzeby, opróżnij pęcherz moczowy
- Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny
- Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu i skontaktuj się pisząc na adres mailowy: **diagpack@diag.pl**
- Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
- W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

UWAGA!

Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku.

INSTRUKCJA POBRANIA:



1. Oddaj kał na podkładkę toaletową naciągniętą na deskę sedesową.




2. Umyj ręce i załóż rękawiczki.



3. Delikatnie odkręć probówkę, uważaj aby nie dotknąć szpatułką żadnej przypadkowej powierzchni. Przy użyciu szpatułki połączonej z zakrętką pobierz próbkę kału odpowiadającą wielkości szpatułki, a następnie umieść ją w probówce z płynem konserwującym.

UWAGA: Płyn znajdujący się w probówce musi zabezpieczyć cały pobrany materiał, uważaj aby go nie wylać. **Jeśli materiału będzie zbyt wiele w stosunku do płynu, konieczne będzie ponowne pobranie próbki.**

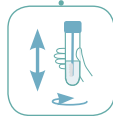

4. Zakręć probówkę i obracaj góra-dół przez ok. 1 min, tak aby materiał dokładnie wymieszał się z płynem konserwującym.



5. Probówkę z pobranym materiałem, zapakowaną w woreczek strunowy z papierkiem, umieść w pudełku. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione OŚWIADCZENIE opisane datą pobrania oraz e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału

Pudełko wyślij w następnym dniu roboczym od pobrania. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj je w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.

ODEŚLANIE ZESTAWU:

**80
dni**

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 80 dni roboczych od daty wystawienia.



Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną: Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>. Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”.

Przesyłka jest opłacona.



Wysyłka powinna nastąpić **w dniach poniedziałek - piątek.**

Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

Nadanie przesyłki powinno nastąpić **niezwłocznie po pobraniu - najpóźniej następnego dnia od pobrania.**