

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

NUMER ZLECENIA

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!



1. wejdź na stronę <https://wyniki.diag.pl>,
2. wybierz „POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz NUMER ZLECENIA
oraz DATĘ URODZENIA

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:

 **695 235 299**

 e-mail: kontakt@nowagenetyka.pl



BADANIE LABORATORYJNE DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

INSTRUKCJA POBRANIA

GENETYCZNA DIAGNOSTYKA DERMATOMYKOZ GRZYBICA PAZNOKCI

Przekazujemy Państwu zestaw umożliwiający samodzielne pobranie w zaciszu domowym materiału do genetycznej diagnostyki dermatomykoz. Test pozwala na szybka i czułą identyfikację czynników wywołujących dermatomykozy.

SKŁAD ZESTAWU:

- Pilniczek jednorazowy
- Pojemnik na opilki
- Gazik odkażający
- Rękawiczki
- Oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych
- Instrukcja pobrania
- Voucher
- Zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.



PRZED ROZPOCZĘCIEM POBRANIA:

- Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
- Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu, skontaktuj się pisząc na adres mailowy: **diagpack@diag.pl**
- Wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
- W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

UWAGA! Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku.

INSTRUKCJA POBRANIA



1. Umyj ręce.



2. Gazikiem odkażającym zdezynfekuj zmieniony chorobowo paznokieć.



3. Otwórz opakowanie z pilnikiem oraz pojemnik na opilki. Do pojemnika spiluj jak największą ilość materiału z paznokcia z podejrzeniem grzybicy.



4. Zakręć szczelnie pojemnik z opilkami.



5. Umieść pojemnik w pudełku. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione OŚWIADCZENIE opisane datą pobrania oraz e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.



6. Pudełko wyślij najpóźniej w następnym dniu roboczym po pobraniu. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj je w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i ciepła.

ODEŚLANIE ZESTAWU:

80 dni

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 80 dni roboczych od daty wystawienia.



Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną: Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>. Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”. **Przesyłka jest opłacona.**



Wysyłka powinna nastąpić **w dniach poniedziałek - piątek**. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi. Nadanie przesyłki powinno nastąpić **niezwłocznie po pobraniu - najpóźniej następnego dnia od pobrania**.