

Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: wyniki.diag.pl
- + wybierz /pojedyncze zlecenie/
- + wpisz numer zlecenia
- + podaj datę urodzenia

Kod kreskowy/numer Twojego zlecenia:

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium.

Zachowaj go!

Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



695 235 299



kontakt@nowagenetyka.pl

Diagpack



Badanie laboratoryjne do samodzielnego pobrania

Instrukcja pobrania

Nanodiagbiom

- badanie mikrobioty jelitowej

Przekazujemy Państwu zestaw umożliwiający samodzielne pobranie w zaciszu domowym materiału do badania molekularnego. Test pozwala na szybką i czułą ocenę składu mikrobiomu jelit.

Skład zestawu:

- probówka wraz ze szpatułką,
- rękawiczki,
- biodegradowalna podkładka toaletowa,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.



Diagnostyka+

diagnostyka.pl

Przed pobraniem:

1. W razie potrzeby, opróżnij pęcherz moczowy
2. Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
3. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu skontaktuj się pisząc na adres mailowy: diagpack@diag.pl
4. Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

UWAGA! Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku i koniecznością zakupu nowego zestawu na koszt pacjenta.



Odeślanie zestawu

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 80 dni od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejając etykietą zwrotną DHL.

- + Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
- + Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”
- + Przesyłka jest opłacona.

UWAGA: Nie rekomendujemy odosłania przesyłki do Punktów Obsługi Paczek.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek - piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

Instrukcja pobrania:

UWAGA: Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem należy wykonywać w jednorazowych rękawiczkach dołączonych do zestawu.



Oddaj kał na podkładkę toaletową naciągniętą na deskę sedesową.



Umyj ręce i załóż rękawiczki.



Delikatnie odkręć probówkę, uważaj aby nie dotknąć szpatułką żadnej przypadkowej powierzchni. Przy użyciu szpatułki połączonej z zakrętką pobierz próbkę kału odpowiadającą wielkości szpatułki, a następnie umieść ją w próbówce z płynem konserwującym.

UWAGA: Płyn znajdujący się w próbówce musi zabezpieczyć cały pobrany materiał, uważaj aby go nie wylać. Jeśli materiału będzie zbyt wiele w stosunku do płynu, konieczne będzie ponowne pobranie próbki.



Zakręć probówkę i obracaj góra-dół przez ok. 1 min, tak aby materiał dokładnie wymieszał się z płynem konserwującym.



Probówkę z pobranym materiałem, zapakowaną w woreczek strunowy z papierkiem, umieść w pudełku. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione OŚWIADCZENIE opisane datą pobrania oraz e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.

Nie odsyłaj Instrukcji pobrania, znajduje się na niej Twój unikalny kod do odbioru wyniku.



Wyślij materiał do laboratorium niezwłocznie. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.