

Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: wyniki.diag.pl
- + wybierz /pojedyncze zlecenie/
- + wpisz numer zlecenia
- + podaj datę urodzenia

Kod kreskowy/numer Twojego zlecenia:

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium.

Zachowaj go!

Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



695 235 299



kontakt@nowagenetyka.pl

Diagpack



Badanie laboratoryjne do samodzielnego pobrania

Instrukcja pobrania

Diagnostyka intymnych
infekcji grzybiczych



Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający samodzielne pozyskanie materiału do badania laboratoryjnego. Test pozwala na szybką diagnostykę infekcji urogenitalnych wywołanych przez grzyby z rodzaju Candida.

Skład zestawu:

- wymazówka,
- podłoże stabilizujące materiał,
- rękawiczki,
- kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.



Diagnostyka+

diagnostyka.pl

Przed pobraniem:

1. Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
2. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu, skontaktuj się pisząc na adres mailowy: diagpack@diag.pl
3. Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

UWAGA! Zestaw jest wyłącznie do jednorazowego użytku.
Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku.



**Odesłanie
zestawu**

W zestawie znajduje się zwrotny list przewoźowy, który jest **ważny 80 dni** od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

- + Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
- + Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”
- + Przesyłka jest opłacona.

UWAGA: Nie rekomendujemy odosłania przesyłki do Punktów Obsługi Paczek.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek - piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

Diagpack

uwaga!

Wymaz z dróg moczowo-płciowych męskich może być pobrany samodzielnie.

Wybór miejsca pobrania (prącie lub cewka moczowa) powinien być uzależniony od miejsca występowania objawów zapalnych.

Instrukcja pobrania wymazu:


Materiał należy pobrać co najmniej po 7 dniach od zakończenia antybiotykoterapii i/lub leczenia środkiem o działaniu miejscowym. Nie należy oddawać moczu co najmniej 2 godziny przed pobraniem wymazu z cewki moczowej do badania. Przez 24 godziny przed pobraniem należy ograniczyć zabiegi higieniczne narządów płciowych oraz zachować 2 dniową wstrzemięźliwość seksualną.



Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
Naklej kod kreskowy wzdłuż próbówki.



Umyj ręce i załóż rękawiczki.

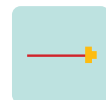


Delikatnie otwórz opakowanie z patyczkiem wymazowym uważając, aby nie dotknąć wymazówki.

a. W przypadku pobierania **wymazu z prącia**: odchyl napletek, a następnie wykonując spiralne ruchy kilkakrotnie pocieraj wymazówką rowek założony na całej długości oraz ujście cewki moczowej.

b. W przypadku pobierania **wymazu z cewki moczowej**: wprowadź wymazówkę do cewki moczowej na głębokość 2-3 cm, następnie obracaj kilkakrotnie wymazówkę w jednym kierunku, nie krócej niż 10 sekund.



Ostrożnie przenieś wymazówkę do podłoża znajdującego się w próbówce.

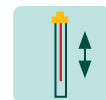

Odłam końcówkę wymazówki w miejscu zaznaczonym na czerwono. Wymazówka będzie wystawać poza próbówkę. Zakręć probówkę, wystająca, elastyczna wymazówka wygnie się w niej. Obracaj probówkę góra-dół przez ok. 1 min.



Zdejmij i wyrzuci rękawiczki, a następnie dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.



Probówkę z pobranym materiałem należy niezwłocznie przesać do laboratorium.



Wyślij materiał do laboratorium niezwłocznie. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.

diagnowyka.pl