

Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: wyniki.diag.pl
- + wybierz /pojedyncze zlecenie/
- + wpisz numer zlecenia
- + podaj datę urodzenia

Kod kreskowy/numer Twojego zlecenia:

Uwaga! Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

Diagpack



Badania laboratoryjne do samodzielnego pobrania

Instrukcja pobrania

Mikrobiota jelit Complete, Mikrobiota jelit Basic, Mikrobiota jelit Pro, Zonulina, Laktoferyna, IgA wydzielnicza

Przekazujemy Państwu zestaw umożliwiający samodzielne pobranie w zaciszu domowym materiału do badań mikrobiomu jelit:

Mikrobiota jelit Complete, Mikrobiota jelit Basic, Mikrobiota jelit Pro, Zonulina, Laktoferyna, IgA wydzielnicza

Skład zestawu:

- probówka wraz ze szpatułką,
- biodegradowalna podkładka toaletowa,
- instrukcja pobrania,
- zlecenie na badanie,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



61 862 63 15



biuro@instytut-mikroekologii.pl



Diagnostyka+

diagnostyka.pl

Przed pobraniem:

1. W razie potrzeby, opróżnij pęcherz moczowy
2. Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
3. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu skontaktuj się pisząc na adres mailowy: diagpack@diag.pl
4. Wypełnij i podpisz zlecenie.
W przypadku osoby niepełnoletniej, zlecenie podpisuje opiekun prawny.

UWAGA! Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku i koniecznością zakupu nowego zestawu na koszt pacjenta.



Odesłanie zestawu

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 80 dni roboczych od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

- + Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
- + Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”
- + Przesyłka jest opłacona.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek - piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

Instrukcja pobrania:



Oddaj kał na podkładkę toaletową naciągniętą na deskę sedesową.



Delikatnie odkręć probówkę, uważaj aby nie dotknąć szpatułką żadnej przypadkowej powierzchni. Przy użyciu szpatułki połączonej z zakrętką pobierz próbkę kału z 8 różnych miejsc, a następnie umieść ją w probówce tak aby wypełnić ją do 3/4 objętości nie pozostawiając pustych przestrzeni.



Probówkę z pobranym materiałem, zapakowaną w zaklejony woreczek, umieść w pudełku. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione zlecenie opisane datą pobrania oraz e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.



Pudełko wyślij w ciągu maksymalnie 24 h od pobrania. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj je w temperaturze 2-8 °C (lodówka).